

چک لیست ارزیابی عملکرد پرسنل CSR
در رابطه با کار با دستگاه اتوکلاو بخار رومیزی Flash

نام و نام خانوادگی : بخش:

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	از پر بودن مخزن آب مقطر تا خط نشانگر اطمینان حاصل می کند.			
۲	از برنامه های دستگاه و طرز کاربرد آنها اطلاع دارد.			
۳	از اتصال درست دستگاه به برق اطمینان حاصل می کند.			
۴	برنامه P1 مربوط به استریل وسایل باز و غیر پک شده را می شناسد.			
۵	دستگاه را روی برنامه P1 می گذارد.			
۶	وسیله را داخل ظرف مورد نظر گذاشته و دریچه های اطراف آن را باز می کند.			
۷	اندیکاتور بخار کلاس ۴ را داخل ظرف مورد نظر می گذارد.			
۸	ظرف حاوی وسیله را داخل دستگاه می گذارد.			
۹	درب دستگاه را کاملاً محکم می بندد.			
۱۰	دکمه استارت جهت شروع استریلیزاسیون وسیله را می زند.			
۱۱	در طول زمان کار با دستگاه به چراغ ها و Alarm های آن دقت می کند.			
۱۲	پس از اتمام دستگاه ظرف را برداشته و دریچه ها را بلافاصله می بندد.			
۱۳	لزوم بستن دریچه های ظرف درخصوص وارد نشدن هوای خارج به داخل ظرف را می داند.			
۱۴	وسیله استریل را همراه ظرف به سیرکولر تحویل می دهد.			
۱۵	ظرف را پس از استفاده، مجدداً از سیرکولر تحویل می گیرد.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۳۰	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور:
- نام و نام خانوادگی سرپرستار:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: