



بسمه تعالی  
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

## چک لیست طرز کار عملی با دستگاه پیس میکر تک حفره ای

نام و نام خانوادگی : ..... بخش : .....

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	از شارژ بودن باتری دستگاه پیس مطمئن می شود.			
۲	رابط پیس را به درستی در محل مخصوص خود نصب می کند.			
۳	از اتصال درست رابط به دستگاه پیس اطمینان حاصل می کند.			
۴	دستگاه را با فشار دگمه on روشن می کند.			
۵	دگمه Rate را روی عدد مورد نظر جراح تنظیم می کند.			
۶	دگمه out put را روی عدد مورد نظر جراح تنظیم می کند.			
۷	دگمه sensitivity را روی عدد مورد نظر جراح تنظیم می کند.			
۸	با توجه به نظر جراح دستگاه را روی Demand یا fix تنظیم می کند.			
۹	دستگاه را در محلی امن قرار می دهد.			

۰ = خیر      ۱ = تا حدودی      ۲ = بلی

درصد	نمره
۱۰۰	۱۸

- نام و نام خانوادگی منتور: ..... امضاء:
- نام و نام خانوادگی سرپرستار: ..... امضاء:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: ..... امضاء: