



بِسْمِ تَعَالَى
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

چک لیست طرز کار با دستگاه EECF

نام و نام خانوادگی : بخش :

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	از متصل بودن دستگاه EECF به برق اطمینان حاصل می کند.			
۲	جهت روشن کردن دستگاه کلید را روی on قرار می دهد.			
۳	اسم بیمار را به سیستم وارد می کند.			
۴	لید های ECG را به طور صحیح به قفسه سینه بیمار متصل می کند.			
۵	پروپ O2S و پلی تیسموگراف را به انگشت مناسب بیمار متصل می کند.			
۶	کاف های فشار EECF را به صورت صحیح به اندام ها وصل می کند.			
۷	منحنی فشار خون شریانی را به صورت صحیح تشکیل می دهد.			
۸	پرینت منحنی را تهیه می کند.			
۹	پس از اتمام کار دستگاه را مرتب کرده و خاموش می نماید.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۱۸	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور:
- نام و نام خانوادگی سرپرستار:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: