

چک لیست استفاده از دستگاه ECG

نام و نام خانوادگی : بخش:

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	از اتصال دستگاه به برق اطمینان حاصل می کند.			
۲	لیدها را در محل صحیح خود بر روی قفسه سینه و اندام ها قرار می دهد.			
۳	دستگاه را روشن می کند.			
۴	فیلتر دستگاه را فعال می کند.			
۵	نوار را به طور صحیح می گیرد.			
۶	لیدها را از بیمار جدا می کند.			
۷	از تمیز شدن لیدها برای استفاده بیماران دیگر اطمینان حاصل می کند.			
۸	از وجود نوار در دستگاه و همچنین نوار اضافه برای استفاده بعدی اطمینان حاصل می کند.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۱۶	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سرپرستان: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: امضاء: